

Protocolo de Como Tirar Medidas: *Chaves*



PRINTING CENTER
FOR HEALTH

Como tirar medidas para a correta utilização do Dispositivo para chaves?

O ideal é medir o diâmetro da circunferência que se forma ao se unir o polegar com o dedo indicador da sua mão dominante, ou seja a mão que usa escreve (medida A), representado pela seta amarela, assinalada nas figuras 1 e 2.



Figura 1.

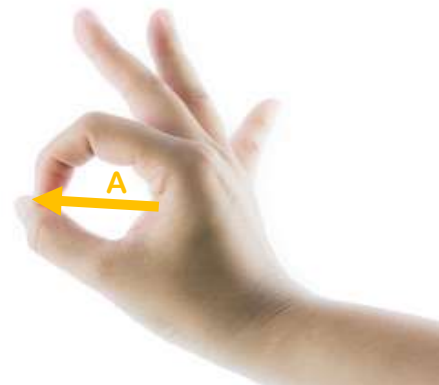


Figura 2.

Este comprimento (medida A) irá corresponder à seta amarela na figura 3, permitindo assim pegar de uma forma correta na peça.

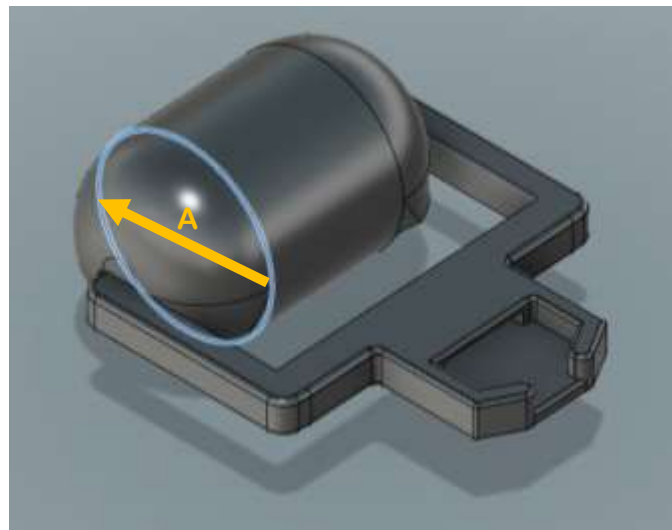


Figura 3.

Adicionalmente serão necessárias algumas medidas da chave em questão. Nomeadamente a espessura da porção mais fina da chave (medida B, assinalada por uma seta vermelha na figura 4), a largura da porção mais grossa da chave (medida C, assinalada por uma seta verde na figura 4) e o comprimento da porção mais grossa da chave (medida D, assinalada por uma seta azul na figura 4).

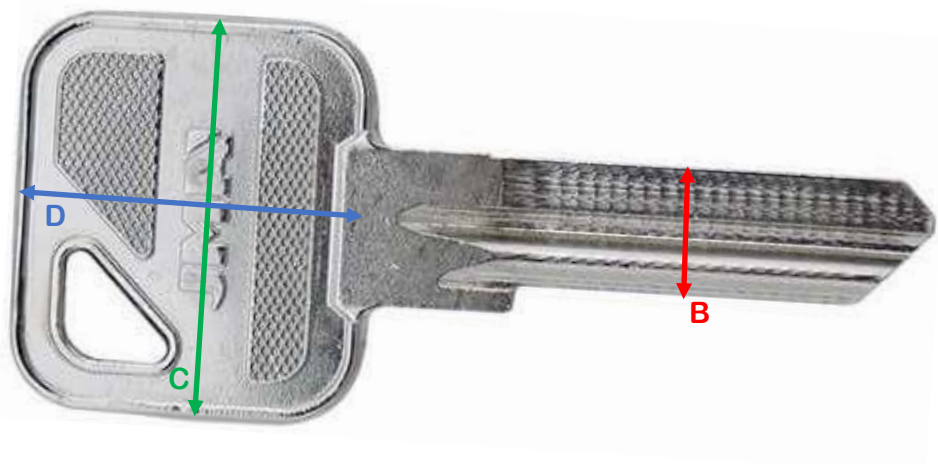


Figura 4.

Estas medidas irão corresponder às setas assinaladas na figura 5, e irão garantir que a chave fique fixa.

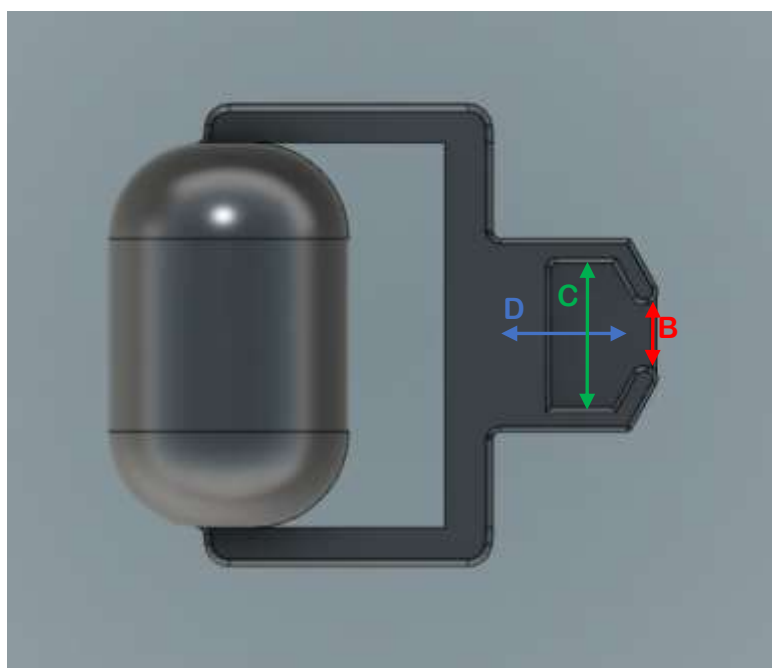


Figura 5.