

Protocolo de Como Tirar Medidas:

Dispositivo de apoio à escrita



PRINTING CENTER
FOR HEALTH

Como tirar as medidas para a correta utilização do dispositivo de apoio à escrita em forma de rato?

Deve medir a distância entre a base da palma da mão e a ponta do 3.º dedo (medida A), representada pela seta a vermelho na figura 1. A medida deve ser feita na mão que usa habitualmente para escrever.

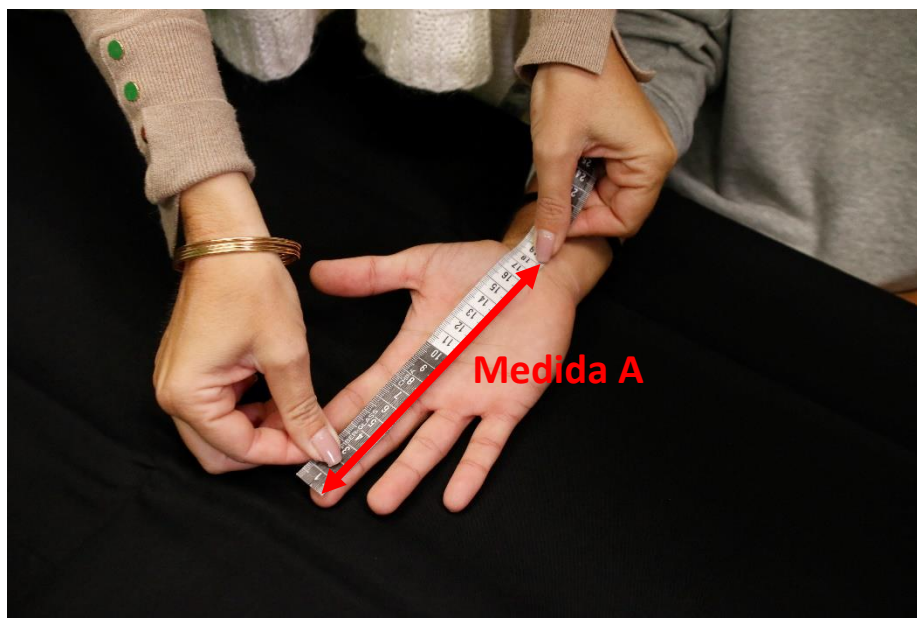


Figura 1.

Este comprimento (medida A) irá corresponder à seta vermelha na figura 2, permitindo assim que a mão repouse confortavelmente na peça.

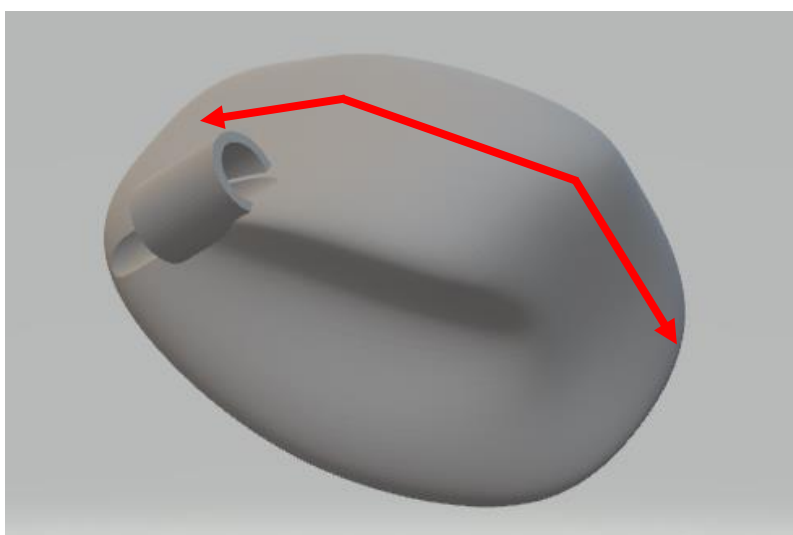


Figura 2.